

## PROCEDURE AFPLAKKEN “FFP2 TAPE NOSE” (VERSIE 16/06/2020)

### Welke tape?

- Medische kleefpleister, hypo-allergeen en latexvrij met een breedte van min. 2,5cm.
- Tape moet goed op de huid kleven maar mag de huid niet beschadigen bij het verwijderen.
- Voldoende luchtdicht.
- 3M Transpore® 2,5 cm x 9.1 (SAP nr. 6408).

### Hoe aanbrengen?

- Ontsmet de handen.
- Zet het FFP2 TAPE NOSE masker op en duw de neusbrug goed aan naar de vorm van de neus
- Kleef een strook 3M Transpore® over de rand van het masker op de huid van de wang tot op de bovenzijde van de neus en dit zowel links als rechts. Zorg voor een overlap van de tape op de bovenzijde van de neus. De breedte van de tape moet voor de helft over de maskerrand en voor de helft op de huid kleven.
- **Druk de tape goed aan op de maskerrand en de aanliggende huid, zeker onder de ooghoeken.**



### Hoe uittrekken?

- Ontsmet eerst de handen.
- Trek het masker uit door de elastieken vast te nemen en langs een zijde weg van het gezicht zachtjes te trekken; normaal zal de tape meekomen met het masker.
- Raak het masker of de tape zelf niet aan met de handen.
- Gooi het verwijderde masker in een blauwe afvalzak NRMA, dus **GEEN HERBRUIK!**
- Ontsmet daarna de handen.

